


スイッチボックス(M3号)取り扱い説明書

1 概要

「M号」は、WindowsパソコンとUSB接続してフリーソフトのJoyToKeyを使ってマウス操作の代替を行うスイッチボックスです。

USBケーブル

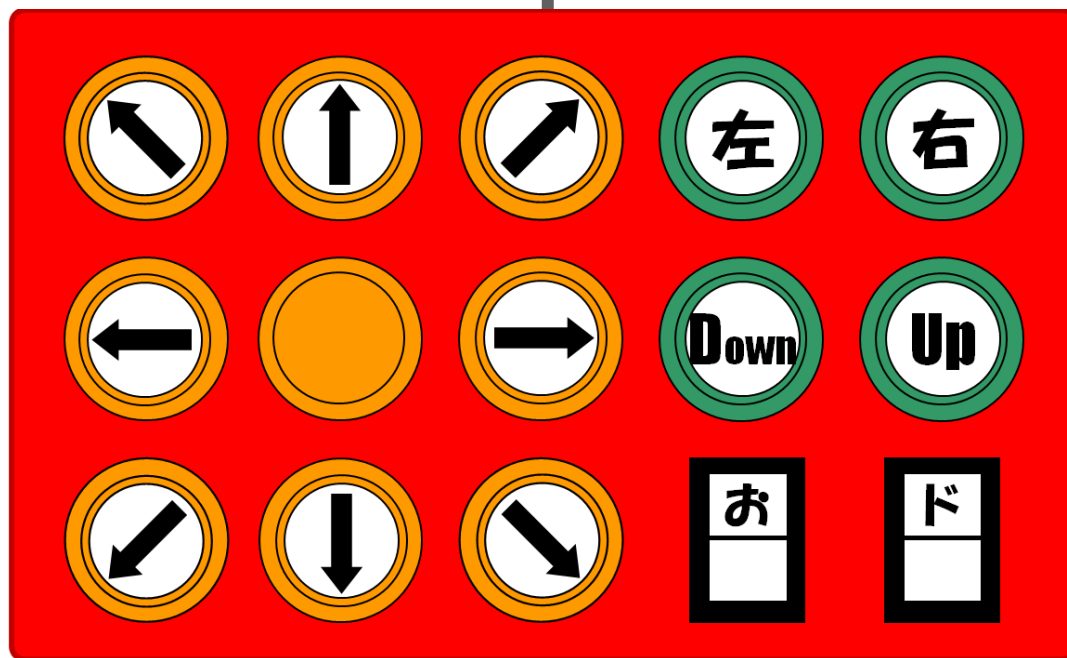

左クリック、右クリック

スクロール

マウスカーソル
の移動

マウスカーソル
の移動速度

ドラッグ

2 準備

2-1 JoyToKeyのセットアップ



① データCDをパソコンのCD/DVDドライブに入れてデータを開きます。

② [JoyToKey46]フォルダをデスクトップにコピーします。



③ デスクトップにコピーした[JoyToKey46]フォルダ → [JoyToKey_4_6]フォルダと開き、JoyToKeyの実行ファイル(のアイコンのファイル)を右クリックし、ショートカットの作成(S)を選びます。


④ 出来たJoyToKeyのショートカットをデスクトップにドラッグして貼り付けます。

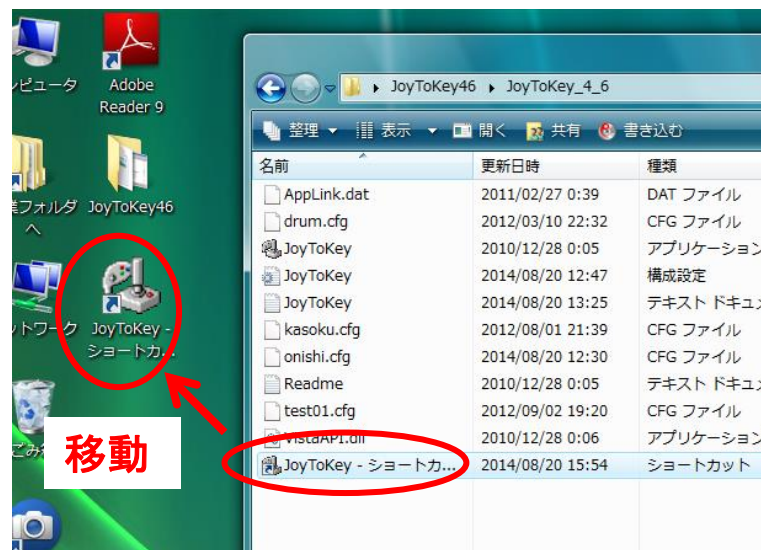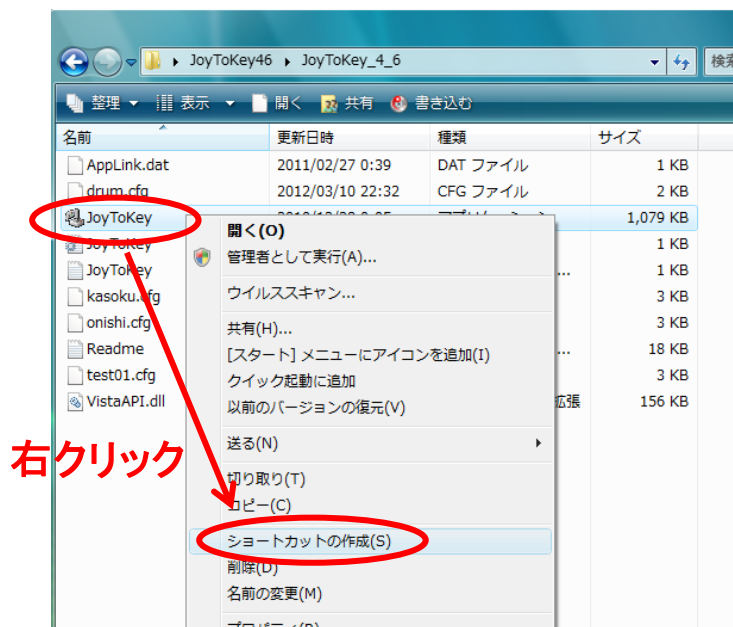


2-2 マウスの設定

Windowsの初期設定ではファイルやアイコンはダブルクリックで開くように設定されていますが、「M3号ではシングルクリックで開くように設定を変更します。
(ダブルクリックの設定のままでダブルクリックすればファイルは開きますが、シングルクリックのほうが操作しやすいです)


① [スタート] ボタンをクリックし、[マイ コンピュータ] をクリックします。

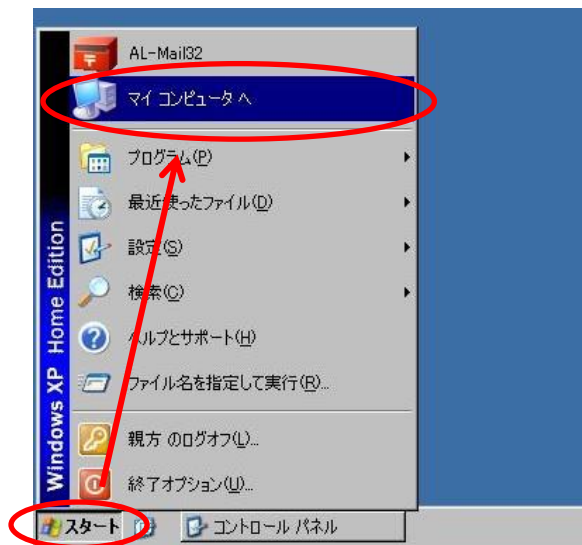

② マイコンピュータが開くので、[ツール] メニューの [フォルダ オプション] をクリックします。

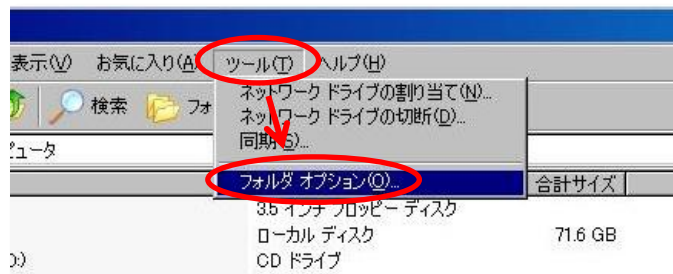


③ [全般] タブで [ポイントして選択し、シングルクリックで開く] をクリックして、[OK] をクリックします。

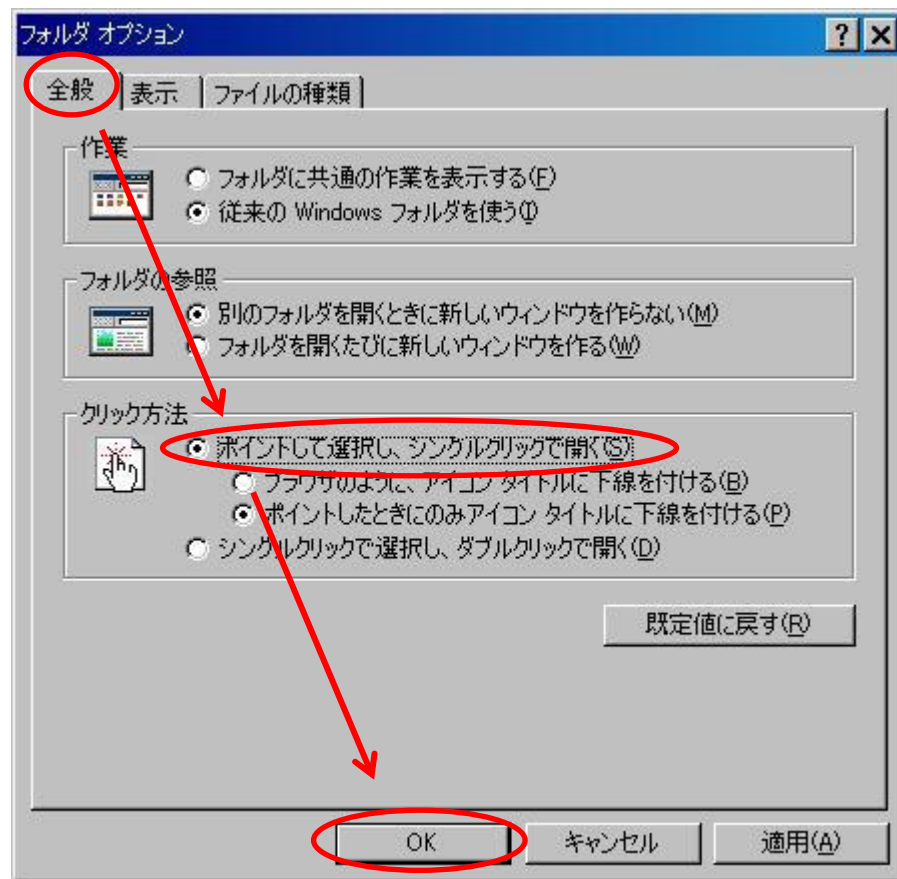

3 使用方法


- ①「M3号」のケーブルをパソコンのUSBポートに接続します。
(初回だけ「M3号」のドライバがパソコンにインストールされます)
- ②デスクトップのJoyToKeyのショートカットをクリックすると、JoyToKeyが起動します。

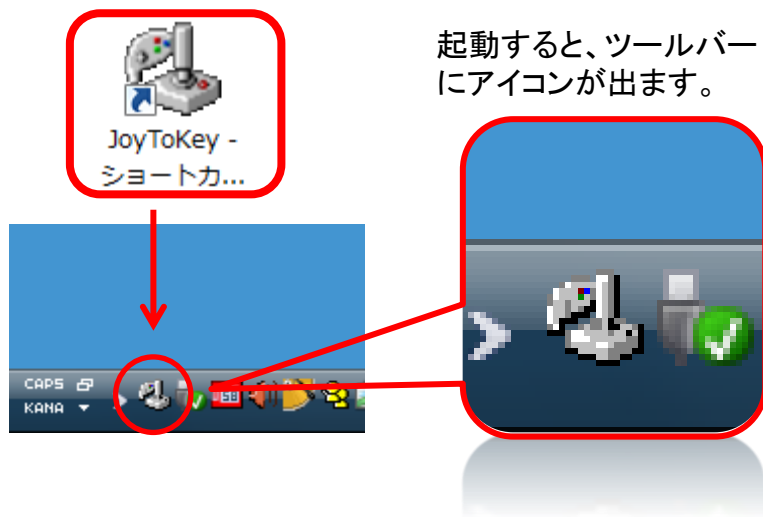

注意

パソコンを使用中に「M3号」を外すときは、外す前に必ずJoyToKeyを終了させてください。マウスがコントロール不能になります。

誤ってJoyToKeyを終了せずに「M3号」を外してしまったときは、「M3号」をもう一度パソコンに接続し直してJoyToKeyを終了してください。

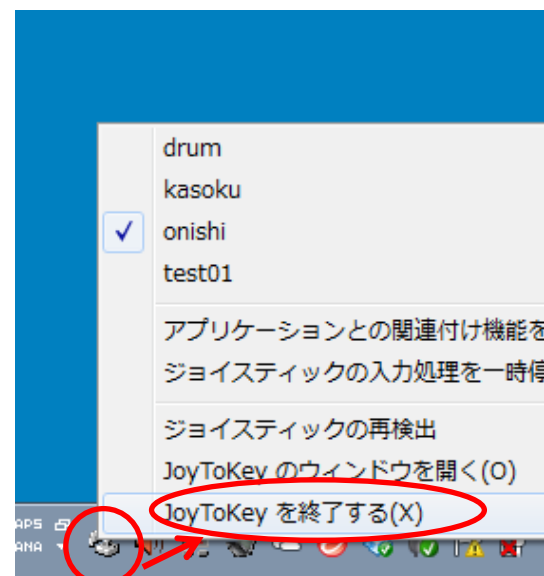

右クリックでメニューを出す



JoyToKeyの終了

タスクバーのJoyToKeyのアイコンを右クリックして、「JoyToKeyを終了する(X)」を選びます。

4 設定の変更

マウスカーソルの移動速度や各スイッチの機能の割り当てを変更したいときの手順です。


① ツールバーのJoyToKeyのアイコンを右クリックして、[JoyToKey のウィンドウを開く (O)] を選ぶと、設定メニューが開きます。

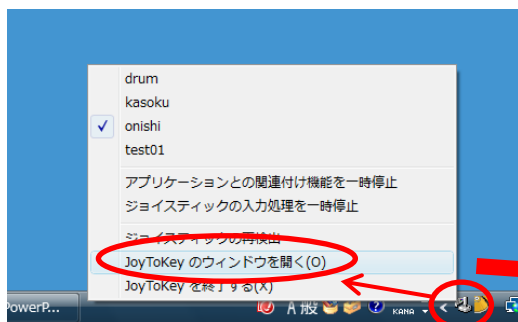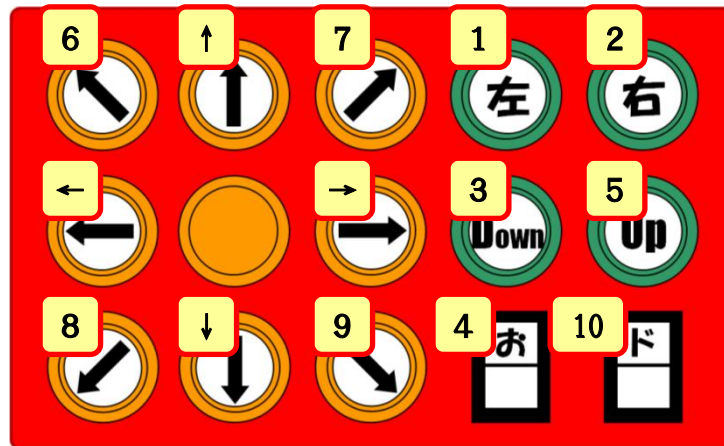

JoyToKeyのアイコン

② 各ボタンをダブルクリックすると、それぞれの設定メニューが開きます。各ボタンの番号は右上の図を参照してください。

③ 変更または調整したいボタンをダブルクリックするとウィンドウが開きます。

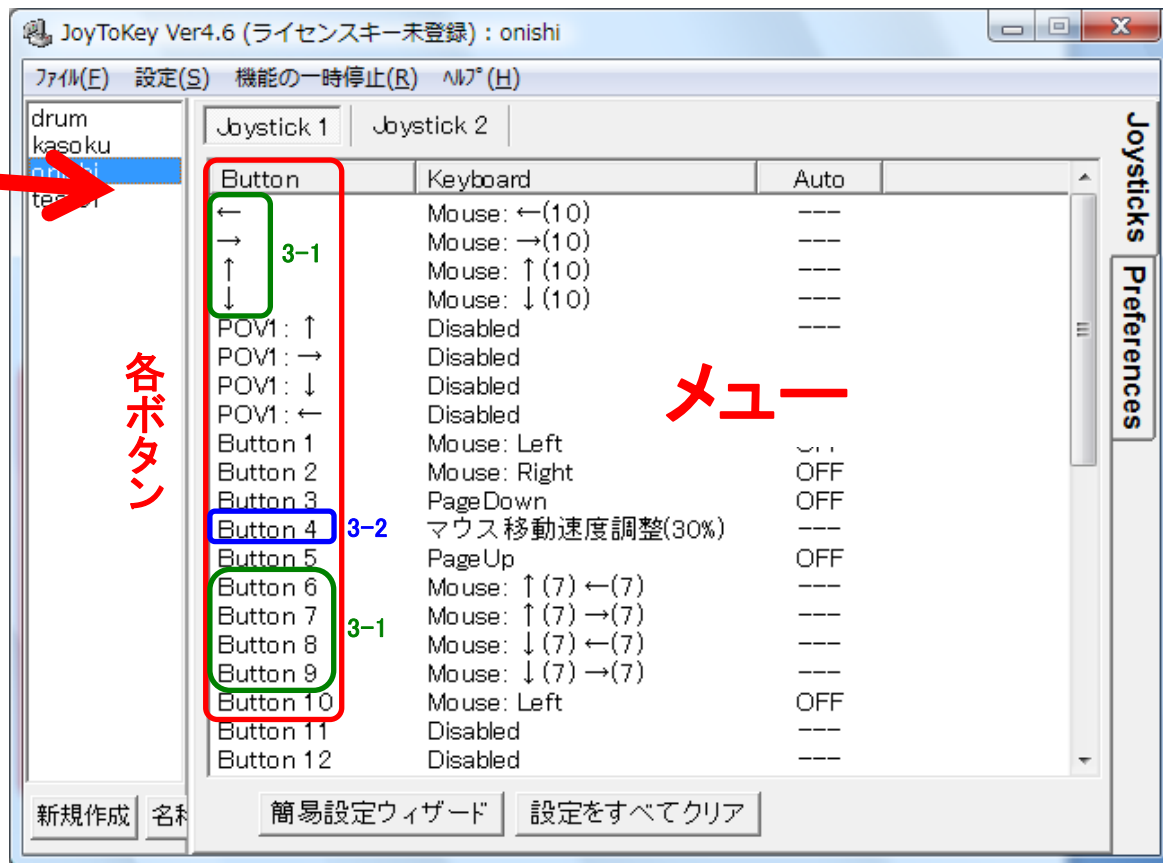

4-1 矢印ボタンの設定変更



「M3号」の矢印ボタン(マウスカーソルの移動)は、メニューの ←、→、↑、↓ と Button 6、7、8、9 に割り当てられています。

例えば、メニューの[←]をクリックして設定を開き、左方向の移動速度を変更します。(右図)

メニューの[Button 6]をクリックして設定を開き、左上方の移動速度を変更します。(下図)

斜め方向の移動速度は、上下左右方向の70%の値にすると均等な動きになります。

これらの設定変更をメニューの [←][→][↑][↓][Button6, 7, 8, 9] のすべてに行います。

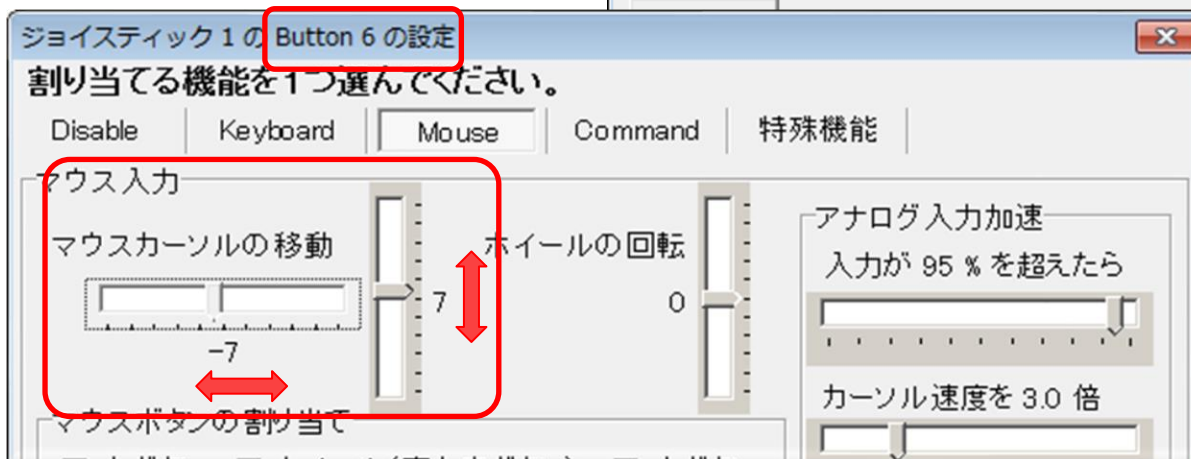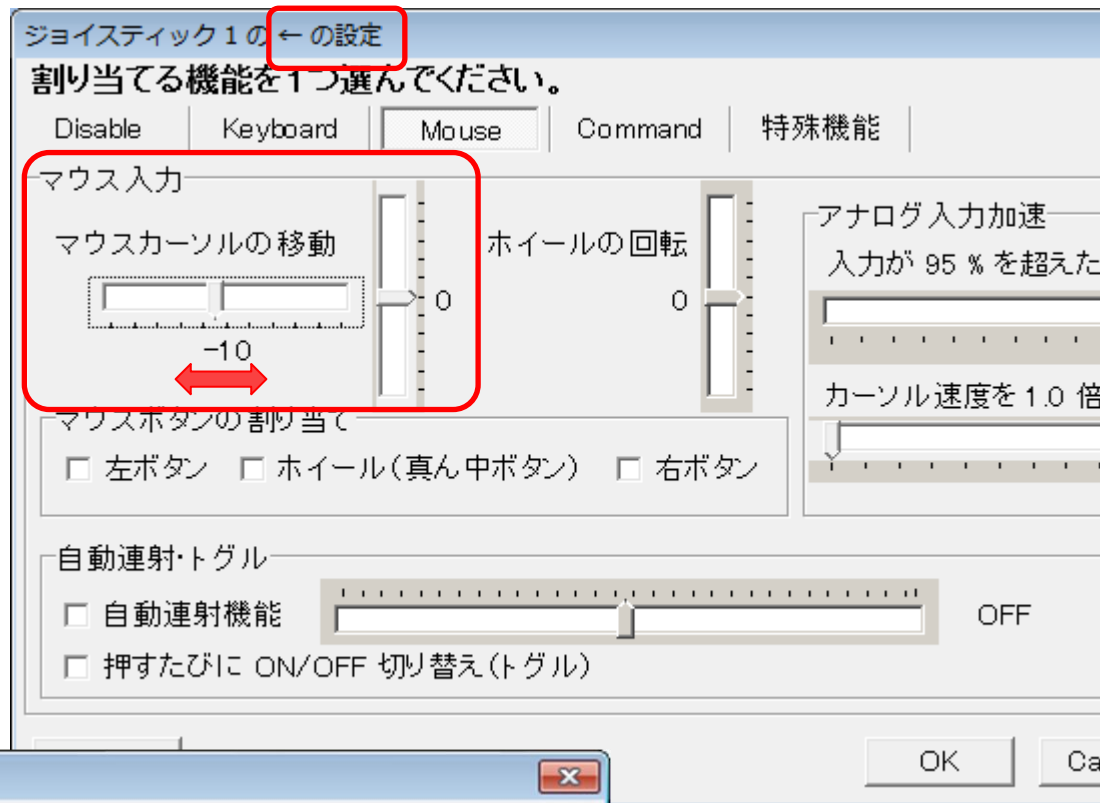


4-2 [お]ボタンの設定変更



「お」ボタンはマウスカーソルの移動速度を遅くするボタンです。マウスカーソルの微妙な位置調整用です。

このボタンを押すと通常の移動速度の**30%の速さ**になるように設定しています。

この設定を変更するには、メニューの[Button 4]をクリックして設定を開き、マウス移動量を変更します。

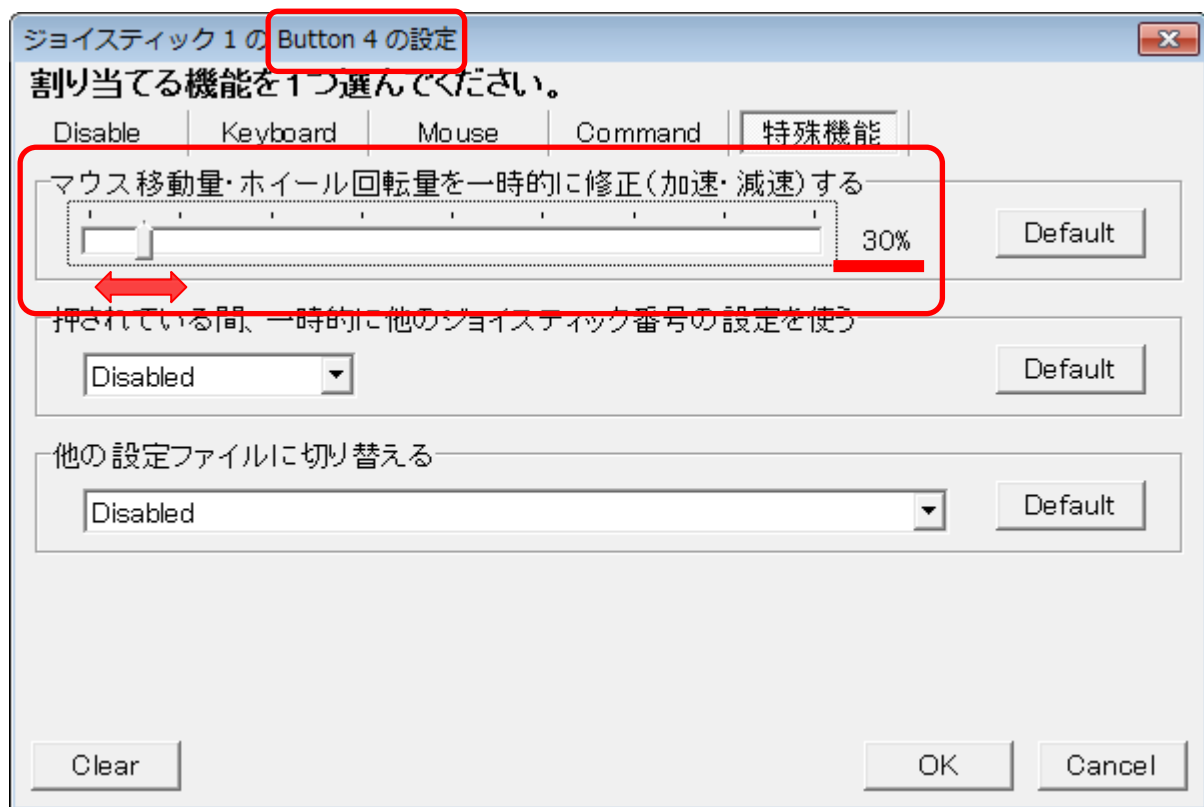

その他のボタンの設定変更も、メニューの各[Button]をクリックして設定を開いて変更します。

5 その他

JoyToKeyについてのもっと詳しい情報は、「JoyToKey Version 4.6 マニュアル」(別紙)を参照してください。

このCDに入れたJoyToKeyのバージョンは4.6で最新のものではありませんが、Windows 7、Windows 8 で「M3号」が正常に動作することを確認しています。

(JoyToKeyの最新のバージョンは、JoyToKey 公式ホームページ <http://joytokey.net/ja/> からダウンロードできます)

6 サポート

「M3号」の使い方や設定で困ったとき、故障、修理が必要なときは、下記に連絡してください。できる限りのサポートをします。